

Fjernstyrt stopp

Fjernstyrt stopp – 24.04.2017

10




Brukermanual fjernstyrt stopp, part.no 101001

Manualen inneholder informasjon angående bruk av fjernstyrt stopp for elektrisk rullestol

Dette produktet er et tilleggsprodukt for ekstra sikkerhet tilsluttet et eksisterende system. Den fjernstyrte stoppen benyttes brukes for å stoppe eller deaktivere en elektrisk rullestol så lenge brukeren er innenfor rekkevidde av senderen. Dersom rullestolen kommer utenfor senderens rekkevidde vil rullestole automatisk stanse opp. Rullestolen kan kjøres så snart senderen kommer innenfor rekkevidde.

Les Brukermanual nøye før rullestolen tas i bruk for å unngå skader på person eller omgivelser.

Deler

		
<p>Figur 1</p>	<p>Figur 2</p>	<p>Figur 3</p>
<p>1. Mottaker, monteres bak på rullestolens rygg</p>	<p>2. Håndholdt trådløs sender</p>	<p>3. Ladekabel til trådløs sender</p>

Programmering ved første gangs bruk

Dette er kun nødvendig ved første gangs bruk, eventuelt dersom håndkontroll eller sender må skiftes.

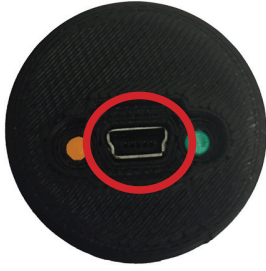

1. Slå av sender og mottaker.
2. Sørg for at ingen andre håndkontroller av samme type er innenfor rekkevidde.
3. Trykk og hold inne den grønne knappen på mottakeren i ca 10 sekunder. Den grønne indikatoren på mottakeren vil blinke raskt. Mottaker er klar til å "lære" den unike koden til håndkontrollen.
4. Vri den røde bryteren på håndkontrollen for å aktivere senderen.
5. Mottakeren vil nå "lære" seg denne unike koden og vil gå over i normal drift.

Betjening av fjernstyrt stopp

	
<p>Figur 4</p>	<p>Figur 5</p>
<p>Trykk og hold inne grønn on/off knapp på mottakeren i ca 5 min. En grønn indikatorlampe vil tennes. (Rullestolen vil ikke kunne kjøres)</p>	<p>Vri den røde bryteren på håndkontrollen for å aktivere senderen.</p>
	
<p>Figur 6</p>	<p>Figur 7</p>
<p>En indikator i enden av håndkontrollen vil blinke grønt.</p>	<p>Mottakeren mottar signal fra håndkontrollen, og indikatoren på mottaker vil blinke. Rullestolen kan nå kjøres.</p>

Lading

Rekkevidde bestemmes av ulike faktorer som

	
<i>Figur 8</i>	<i>Figur 9</i>
Håndkontrollen lades via USB, på samme måte som en mobiltelefon. Alle typer ladeadaptere kan benyttes. (Nettadaptere, PC, sigarettener i bil med mer).	Ladetid er ca 6 timer. En oransje indikator lyser når lading pågår, denne slukkes når batteriet er ferdig ladet. Oppladet batteri gir ca. 22 timer kontinuerlig brukstid. Den grønne indikatoren vil begynne å blinke sakte når batteriet bør lades på nytt.

Tekniske spesifikasjoner

	Mottaker	Sender
Frekvens	868 Mhz	868 Mhz
Driftsspenning	9-32v	3,7v/650mA
Releutgang	1 pol veksel kontakt (max 300mA)	-----
Batteri	-----	LiPo (lades via usb)

Komplett system:

Antall	Del	Varenr.
1	RX-RF-STOP (mottaker)	101146
1	1 stk TX-RF-STOP (sender)	101145
1	Usb ladekabel	101161
Tilbehør	Ledningenett, fjernstyrt stopp, Karma	101162

